

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

- Detta säkerhetsmeddelande avser Ståplattor oavsett utförande/variant tillverkade/levererade av GATE REHAB DEVELOPMENT AB
- Tillverkningsdatum: 200211–200930



Beskrivning

GATE har fått information om att tapp (bild1) som hjulet sitter på kan lossna från fäste (bild 2). Orsaken är dålig svets på ovan sida av tappen (bild3).

Hälsorisker

Om tappen /hjulet lossnar så kan det innebära en fallrisk för brukaren.

Åtgärder

Gate Rehab Development AB kommer att kontakta alla berörda kunder och byta ut produkter levererade under perioden. GATE Uppmanar alla att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av dem berörda produkter. Visuell inspektion och hållfasthetskontroll rekommenderas.



BILD 1



BILD 2



BILD 3

Tfn: +46 371 31 800, Email: info@gaterd.se

Om du behöver ytterligare information eller teknisk hjälp kontakta din tekniska support som vanligt. Vi ber om ursäkt för alla eventuella problem detta kan orsaka.

SPRID DENNA INFORMATION TILL BERÖRDA INOM ER ORGANISATION!
Denna säkerhetsinformation har meddelats Läkemedelsverket.