
Viktigt Säkerhetsmeddelande
Parkeringsbroms för rullstol Cross 5**Korrigerande åtgärd****2018-08-29**

Bästa kund,

Detta säkerhetsmeddelande ger information om en korrigerande säkerhetsåtgärd avseende *parkeringsbromsar för rullstol Cross 5*. Säkerhetsmeddelandet syftar till att informera alla köpare av berörda produkter om bakgrunden och genomförandet av den korrigerande åtgärden.

Berörda produkter:

Parkeringsbromsar för rullstol Cross 5. För artikelnummer och distribution: se sidan 2 i detta dokument.

Bakgrund:

Etac har mottagit rapporter om funktionsproblem angående *parkeringsbromsar för rullstol Cross 5*. Det är rapporterat att produkten i ett fåtal fall uppvisat nedsatt bromsfunktion. Det är konstaterat att detta är orsakat av variationer i hållfasthet i vissa av produktens komponenter som i sin tur kan leda till nedsatt bromsfunktion över tid.

Det finns en potentiell risk för skada om *Parkeringsbromsar för rullstol Cross 5* har en nedsatt bromsfunktion när en användare förflyttar sig från eller till rullstolen.

Korrigerande åtgärd:

För att undvika en potentiell situation med *parkeringsbromsar för rullstol Cross 5* med nedsatt bromsfunktion gör Etac denna frivilliga korrigerande marknadsåtgärd avseende alla potentiellt påverkade produkter genom att erbjuda ersättningsbromsar för utbyte vid ett passande tillfälle, t ex vid rekonditionering eller planerad service, och för utbyte av parkeringsbromsar på lager.

Det finns ingen anledning att stoppa användandet av *parkeringsbromsar för rullstol Cross 5*, men som en tillfällig förebyggande åtgärd ombeds ni att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på nedsatt bromsfunktion. Parkeringsbromsens korrekta funktion och injustering finns angiven i manualen för respektive rullstolsmodell.

Tabellen på sidan två visar vilka artiklar som omfattas av marknadsåtgärden.

Etac beklagar olägenheterna som kan uppstå på grund av marknadsåtgärden. Köpare av berörda produkter ombeds att vidarebefordra denna information till alla som behöver vara informerade inom er organisation, och till annan organisation som har fått leverans av de potentiellt påverkade produkterna.

Undertecknad bekräftar att Läkemedelsverket har informerats.
Detta dokument är en översättning från originalet på engelska.

Kista 2018-08-29
Med vänlig hälsning

Mats Göthberg
VD Etac Sverige AB

Vänd er med frågor eller synpunkter till:

Kundservice Etac Sverige AB

Telefon 0371-587300
E-post info@etac.se

Berörda artiklar och distribution

Artnr	Produkt	Distribution
27528-1/-2	Broms Cross vinklad röd handtag hö mod 3 / vä mod 3	<p>Alla leveranser från Anderstorp, från augusti 2017 till och med maj 2018, monterade på rullstolar såväl som reservdelar.</p> <p>Berörda serienummer:</p> <p>Monterat på rullstol Cross 5 från 37A54363 till 37A71465</p>
27532-1/-2	Broms Cross vinkl svart handtag hö mod 3 / vä mod 3	
83113	Broms Cross basmodell hö	
83114	Broms Cross basmodell vä	
27530-1/-2	Broms Cross förl handtag hö fällbar mod 3 / vä fällbar mod 3	

Artnr som slutar med -1 betyder Höger, artnr som slutar med -2 betyder Vänster.

Bild 1: **Äldre** bromsar med logotypen "Etac Original" enligt nedan är inte berörda av detta säkerhetsmeddelande.

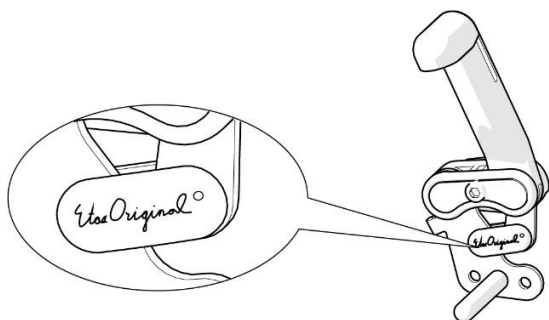


Bild 2: **Nyare** bromsar med en vit märkning enligt nedan är inte berörda av detta säkerhetsmeddelande.

