

# Handbok

## Victor Reader Stratos 12M

2016-09-26



## **1 Grundläggande beskrivning**

### **1.1 Spelarens knappar och anslutningar**

**På spelarens överkant** finns en anslutningar. I anslutningen sätts eladapter in för laddning av batterierna.  
till vänster är SD-kortläsare.  
Anslutningen till höger är till Hörlurar.

**På spelarens högersida** finns två anslutningar och en SD-kortläsare.  
Överst sitter en SD-kortläsare  
Den mellersta anslutningen är för USB. Antingen ett USB-minne eller en USB-kabel som kopplas till dator  
Den nedre anslutningen är för hörlurar

**På spelarens nederkant** finns CD-läsaren.  
För in CD-skivan ovanför kanten. När ca halva skivan förts in drar spelaren automatiskt in skivan och börjar sedan läsa upp titeln på skivan och därefter läses texten upp.  
Ta ut skivan genom att trycka på mata ut.

**På spelarens framsida** finns fyra grupper av knappar. Den översta gruppen finns sex knappar eller tre dubbelknappar.  
Till vänster sitter Tonhöjd + överst och Tonhöjd – nederst.  
I mitten sitter Volym + överst och Volym – nederst.  
Till höger sitter Hastighet + överst och Hastighet - nederst.

I mitten finns ett, telefonliknande nummerknappbord. 0 till 9, samt \* (stjärna) och # (fyrkant).

1 Bokhylla

- 2 Upp
- 3 Radera bok eller anteckning
- 4 Vänster
- 5 Var är jag, Sidor räknas upp
- 6 Höger
- 7 Meny
- 8 Ned
- 9 Inspelat ljud
- 0 Info om boken
- \* Avbryt
- Lång tryckning, Låst
- # Bekräfta

Längst ned finns fyra knapper.

Den ensamma knappen i mitten, Automatisk avstängning, kort tryckning, talar om tid och datum. Lång tryckning, gör det möjligt att Ställa in Tid och Datum. Genom dubbeltryckning kan du ställa in Automatisk avstängning.

Den vänstra knappen i den nedre raden, Spola tillbaka.

Den mitterstaknappen, Start/Stop, används för att starta eller stoppa uppspelningen.

Den högraknappen, Spola framåt.

Till vänster finns tre knapper "på höjden".

Längst upp sitter Gå till. Denna knapp används för att Gå till Sida, gå till rubrik eller gå till tid. Med denna funktion kan du bläddra längre stycken i boken.

Den mittersta knappen används för Bokmärke. Beskrivs längre fram i texten.

Den nedre knappen är Mata ut. Genom att trycka Mata ut åker skivan ut.

Till höger om nummerknappbordet finns en nedsänkt knapp som Av/På. Med denna knapp slår du på eller stänger av

spelaren. Håll in tills det hörs en ton. En ton spelaren slås på, en dubbelton, spelaren slås av.

## **1.2 Funktioner**

### **Starta spelaren**

Kontrollera om spelaren är påslagen genom att trycka på Start/Stopp. Om spelaren inte säger något är den av.

- Håll in Av/På tills en ton hörs

### **Vad är klockan**

- Tryck Automatisk avstängning spelaren säger tid och datum.

### **Volym**

- + För att öka volymen, tryck Volym +.
- För att minska volymen, tryck Volym -.

### **Uppspelningshastighet**

- + För att öka uppspelningshastigheten tryck Hastighet +.
- För att minska uppspelningshastigheten tryck Hastighet -.

### **Sätt in SD-kort**

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster. Tryck in kortet i kortläsaren på översidan och låt det "fjädra" ut. Kortet sitter inne i spelaren.

### **Tag ut SD-kortet**

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

## **Information**

- Tryck 0, spelaren säger info och börjar sedan läsa upp information om talboken och hur mycket tid det är kvar mm. Istället för att lyssna på all information, så kan du trycka Höger till önskad rubrik.
- Tryck 5, för att få reda på var i boken du befinner dig, procentuellt, avsnitt och sid nummer.

## **2 Användningsområden**

### **2.1 Daisy**

#### **Välj bok**

- 1 Tryck på 1 (Boklista), spelaren säger Talböcker och vilken bok du står på.
- 2 Tryck Höger eller Vänster till önskad bok.
- 3 Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen

#### **Starta eller stoppa Uppspelning**

- Tryck Start/Stopp

#### **Flytta framåt/bakåt i boken**

Det finns flera olika sätt att förflytta sig i boken.

- Håll ned Spola tillbaka eller Spola framåt för att spola bakåt eller framåt i boken. Det hörs hur den spolar. Med denna funktion kan endast spolningen ske upp till max 1 minut.
- Vill du hoppa mellan mening/tidshopp/sida/nivå så trycker du först 2 eller 8 för att välja på vilket sätt du vill hoppa och därefter Höger eller Vänster.
- Ungefär på samma sätt, kan Gå till användas. Här finns tre alternativ att välja mellan. Gå till sida, Gå till

avsnitt eller Gå till tid och därefter skriv Sidnummer, Avsnittsnummer eller tid, tryck därefter # (Bekräfta)

### **Automatisk avstängning och tidsangivelse**

Med denna inställning kan du få din spelare att automatiskt stäna av sig efter 15, 30, 45, 60 minuter, skraddarsydd eller av..

- 1 Tryck Automatisk avstängning, spelaren läser upp tid, datum.
- 2 Tryck Automatisk avstängning igen, för att ställa in tiden för avstängning, spelaren säger Automatisk avstängning 15 minuter.
- 3 Vid flera tryckningar på Automatisk avstängning kommer spelaren att säga Automatisk avstängning 30 minuter, ...45 minuter, ...60 minuter. Skraddarsydd eller Automatisk avstängning av.
- 4 Tryck Bekräfta eller Start/Stopp vid önskat alternativ. Vill du avbryta, tryck Avbryt

När den automatiska avstängningen eller du själv stängt av spelaren, så har funktionen upphört. Du måste alltså göra om proceduren nästa gång du läser en bok och önskar automatisk avstängning.

### **Hur lång tid är det kvar innan spelaren slås av**

Tryck Automatisk avstängning, spelaren säger hur lång tid det är kvar.

### **Stäng av automatisk avstängning**

Tryck Automatisk avstängning till spelaren säger Automatisk avstängning av. Spelaren fortsätter uppspelningen.

Det kan hända att spelaren fortsätter att läsa mellan tryckningarna på Automatisk avstängning. Trycker du

ytterligare en gång på Automatisk avstängning, så fortsätter den att göra inställningar.

### **För att lägga in ett bokmärke.**

- 1 Tryck Bokmärke två gånger. spelaren säger Infoga bokmärke.
- 2 Tryck Start/Stop spelaren säger Bokmärke "nummer" infogat.

### **Gå till bokmärke**

- 1 Tryck Bokmärke, spelaren säger Gå till bokmärke.
- 2 Skriv in numret på det aktuella bokmärket du vill gå till.
- 3 Tryck Start/Stopp, spelaren startar uppspelningen från angivet bokmärke

### **Ta reda på senaste bokmärket**

- 1 Tryck 0, spelaren säger Information och bokens titel, Tryck Höger till spelaren säger Batteridrift och hur mycket batteri det finns kvar i procent.  
Ett annat alternativ är att lägga in ett nytt bokmärke och på så sätt få reda på vilket det tidigare var.

Genom att lägga in ett bokmärke, så får du numret på detta bokmärke och då vet du att det tidigare bokmärket är aktuellt bokmärkesnummer minus 1

### **För att radera ett bokmärke. (används inte så ofta)**

- 1 Tryck Bokmärke till spelaren säger Ta bort bokmärke.
- 2 Skriv in numret på det bokmärke du vill ta bort.
- 3 Tryck Start/Stopp, spelaren säger, Bokmärke "nummer" borttagen.

## **2.2 Spara musik på SD-kortet**

Samma procedur som ovan, förutom att de ska sparas i mappen \$VRMusic..

## **2.3 Läsa dokument på spelaren**

Kopiera texten, på samma sätt, enligt ovan till SD-kortet. Filerna ska sparas i mappen \$VRText. Du kan spela upp Word- (.doc och .docx) och textfiler (.txt) från SD-kortet.

## **2.4 Spela upp text**

- 1 Tryck Bokhylla till spelaren säger Textfiler samt antalet
- 2 Tryck Höger eller Vänster tills du kommer till rätt text.
- 3 Tryck Start/Stopp för att starta eller stoppa uppspelningen.

## **3 Kapacitet**

SD-kortets minne, max	32 GB
Inspelningstid	Tills kortet är fullt

## **4 Inställningar**

### **4.1 Grundinställningar**

#### **Ställ in datum och tid**

- 1 Håll in Automatisk avstängning, spelaren säger Inställningar för datum och tid. Ange tid
- 2 Tryck Höger, spelaren läser upp aktuell tid. Ställ in timme
- 3 Skriv in timmar och tryck Bekräfta. Spelaren säger Ange minut.



- 4 Skriv in minuter och tryck Bekräfta, Spelaren läser upp tiden
- 5 Tryck Nedåt för att ställa in datum, spelaren säger Ställ in datum och läser därefter upp datumet.
- 6 Tryck Höger, spelaren säger ange år. Skriv in år, tryck Bekräfta.
- 7 Spelaren säger, Ange månad, skriv in månad och tryck Bekräfta.
- 8 Spelaren säger, Ange dag, skriv in dag och tryck Bekräfta.
- 9 Spelaren läser upp datum och säger Datum bekräftat. Tryck Automatisk avstängning för att lämna inställningen.  
Ställ in språk
- 1 Tryck Meny, tills talsyntesen säger Ställ in språk, röstfri talsyntes, namn.
- 2 Tryck Höger och lyssna på de talsynteser som det finns att välja på. Välj önskad talsyntes genom att trycka Bekräfta.